

Advertencias

Antes de cada intervención consultar el manual de instrucciones de la máquina que necesita mantenimiento.
En la página web: www.cattani.it están todos los manuales actualizados.



Para cualquier operación de mantenimiento usar: guantes, gafas, mascarilla y bata monouso.



Antes de operar sobre la máquina, apagar y quitar la tensión.

En cada intervención

Controlar que no se formen obstáculos en la ventilación de las máquinas (polvo, papel, hojas etc.)

Mantener la sala de máquinas libre de todo lo que no sea pertinente con las máquinas mismas, especialmente material inflamable, explosivo y corrosivo.



Ocasionalmente

Controlar que la temperatura del local esté comprendida entre **5°C** y **35°C**

Controlar el funcionamiento de las señales acústicas y luminosas.

Un aumento del nivel sonoro indica un mal funcionamiento; intervenir a tiempo evita una avería más grave.



Aspiración

Diariamente

Aspirar 1 litro de agua tibia mezclado con Puli-Jet Cattani por cada terminal de aspiración. En caso de realizar intervenciones quirúrgicas largas, esa limpieza ha de hacerse después de cada intervención.




Llenar el Pulse Cleaner con 2.5 l de agua tibia. Verter 10 ml de Puli-Jet para sanitizar o 20 ml para desinfectar apretando suavemente la botella y rellenando el dosificador.

Aspirar la solución conectando las cánulas de aspiración del sillón a los terminales de Pulse Cleaner.

La solución que queda al fondo se podrá utilizar para sanitizar la escupidera.

No aclarar la aspiración, no abrir el enjuagatorio de la escupidera: durante toda la noche Puli-Jet Plus seguirá disolviendo sangre y baba y desinfectando.

Substituir los filtros del soporte de cánula e introducir una pastilla antiespumógena desinfectante.

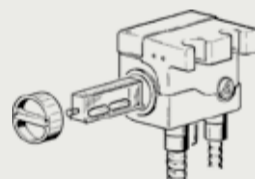

Semanalmente

Limpiar el filtro del motor de aspiración, debajo de un grifo con agua fría (si fuera necesario soplar con aire comprimido o agua a presión) y volver a colocar comprobando que quede bien ajustado.



Compresores

Ocasionalmente

Controlar el funcionamiento de las ventolas.



Controlar que a la parada del compresor, el aire del calderín pequeño recorra contracorriente la columna de secado, purgando la humedad y regenerando el gel de sílice.



Anualmente

Cambiar el filtro de cartón de cada cilindro.

